

TURQAS [®]	MEDİOS MEDİKAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ	Doküman Kodu	TUR-PRP-17
		Yürürlük Tarihi	20.05.2023
		Rev. No / Tarihi	01/12.01.2024
		Sayfa	1/2
KAN GAZI DIŞ KALİTE KONTROL PROSPEKTÜS			

KAN GAZI BLG2412 / BLG2406

KULLANIM AMACI

Klinik laboratuvarlar için ulusal ve uluslararası ölçekte dış kalite kontrol programlarının düzenlenmesi, bu programlarda kullanılacak biyolojik materyallerin oluşturulması ve bu materyallerin klinik laboratuvarlara gönderilerek test edilmesinin sağlanmasıyla geri bildirilen sonuçlar üzerinden katılımcı laboratuvarların performans değerlendirmelerinin yapılmasıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMİ VE UYARILAR

Numuneler ampül şeklinde hazırlanmıştır. Numunelerin enfeksiyon viral etkenler yönünden serolojik testleri yapılmıştır ancak numuneler biyolojik kökenli olduğu için tüm enfeksiyon etkenleri açısından risk taşıdığı göz önünde bulundurulmalı ve bulaş riskini en aza indirecek şekilde titizlik ile çalışılmalıdır.

ÖRNEK HAZIRLIĞI

DKK numunelerine rutin numune gibi işlem yapılmalıdır. Test çalışması yapılacak o aya ait örnek numaralı 2.5ml ampul şeklinde kontrol numunesi kullanıma hazır şekilde gönderilmektedir. Çalışma yapmadan önce +18-25°C'ye gelmesini bekleyiniz. Ampülü üst kısmından kırınız. Yaralanmamaya dikkat ediniz. Ampülü kırdıktan sonra 1 dk içerisinde cihaza veriniz. Çalışma yapılırken rutin çalışma ile aynı metotlar izlenmeli DKK için özel muamele edilmemelidir.

SAKLAMA VE STABİLİTE

Numuneler +18-25°C oda sıcaklığında üzerinde yer alan son kullanma tarihine kadar stabildir. Ampul kırıldıktan sonra tekrar kullanılamaz.

SINIRLAMALAR

Sonuçların girişi TURQAS PORTAL üzerinde hataların önlenmesi ve büyük sapmaların önüne geçebilmek adına kısıtlanmıştır. Her parametre için program protokolünde tanımlanan sınır değerler dışında sonuç girmeyiniz. Katılım için metot kısıtlaması bulunmamakla beraber numunenin çalışma aralıkları DKD protokolünde detaylı olarak sunulmuştur.

SONUÇLARIN RAPORLANMASI

Kullanıcı adınız ve şifreniz www.turqas.com adresinden TURQAS sekmesini tıklayarak "PORTAL GİRİŞİ" kısmından "Kullanıcı Adı" (sisteme tanımlı mail adresiniz) ve TURQAS tarafından belirlenen "Şifre" ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sonuçları girerken öncelikle "Laboratuvar Paneli" sekmesinden "Numune İşlemleri" alt sekmesini seçerek "Numuneyi teslim aldım." Butonunun onaylamanız gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra yine "Laboratuvar Panel" sekmesinde yer alan "Cihaz/Konum Bilgisini" ve "Test, Yöntem Tanımı" alt sekmelerini doldurduktan sonra "Sonuç Giriş" alt sekmesinden sonuçlar girilebilmektedir. Sonuçlar ölçüm belirsizlikleri bildirilmeden yapılan analiz sonucu üzerinden yapılmalıdır. Sistemde birim değiştirici bulunduğundan katılımcıların kendi birimleri ile giriş yapmalarına olanak sağlar. Giriş yapılmak istenen birim, birim listesinde yoksa TURQAS ile iletişime geçilmelidir. Sistemde sonuç girişleri kısıtlanmış olup anlamlı sayı yönlendirmesi ilgili ekranda mevcuttur. Her kurum cihaz ve yöntemini kendisi seçecektir. Cihaz/Konum Bilgisinde değişiklik yapan laboratuvarlar farklı yöntemlere geçiş yapabilirler. Sonuçlar girildikten sonra her çevrim ayından sonraki ayın 15i ile 25i arasında sonuçlar açıklanmaktadır. İlgili kurumlar raporlarını www.turqas.com adresinden kullanıcı adı ve şifre ile kendi profillerine giriş yaparak "Aylık Sonuç Raporu" sekmesinden raporlarına ulaşabilirler. Tüm raporlar TURQAS üzerinden otomatik olarak ve her kullanıcıya ayrı ayrı oluşturulur.

GEÇ GÖNDERİLEN SONUÇLAR

Sonuç giriş tarihine kadar sonuçlarını girmeyen kullanıcılar için her çevrimin sonuç giriş tarihinden itibaren 7 gün içerisinde "Geç Sonuç Girişi" yapabilmektedirler. Geç gönderilen veya değiştirilmiş sonuçlar o aya ait oluşmuş olan ortalama ve standart sapma değerlerini etkilemezler. Zamanında gönderilen sonuçların oluşturmuş olduğu hedef değer ve standart sapmaya göre hesaplamaları yapıp raporları hazırlanır. Raporda sonuçların geç sonuç girişi ibaresi yer alır.

KAN GAZI BLG2412 / BLG2406

ÇALIŞMA TAKVİMİ

12 döngü ve 6 döngü şeklinde 2 kısımda belirtilmiştir. Üyelik durumunuza göre dikkate alınız.

Çalışma Ayları	Örnek Lotları	Önerilen Çalışma Takvimi	Sonuçların Son Giriş Tarihi
Ocak	BLG2401	23.01.2024	31.01.2024
Şubat	BLG2402	20.02.2024	29.02.2024
Mart	BLG2403	19.03.2024	31.03.2024
Nisan	BLG2404	23.04.2024	30.04.2024
Mayıs	BLG2405	21.05.2024	31.05.2024
Haziran	BLG2406	25.06.2024	07.07.2024
Temmuz	BLG2407	23.07.2024	31.07.2024
Ağustos	BLG2408	20.08.2024	31.08.2024
Eylül	BLG2409	24.09.2024	30.09.2024
Ekim	BLG2410	22.10.2024	31.10.2024
Kasım	BLG2411	19.11.2024	30.11.2024
Aralık	BLG2412	24.12.2024	31.12.2024

Çalışma Ayları	Örnek Lotları	Önerilen Çalışma Takvimi	Sonuçların Son Giriş Tarihi
Şubat	BLG2402	20.02.2024	29.02.2024
Nisan	BLG2404	23.04.2024	30.04.2024
Haziran	BLG2406	25.06.2024	07.07.2024
Ağustos	BLG2408	20.08.2024	31.08.2024
Ekim	BLG2410	22.10.2024	31.10.2024
Aralık	BLG2412	24.12.2024	31.12.2024

NOT: Güncel dokümanları www.turqas.com web sitesi üzerinden giriş yaparak edinmeniz gerekmektedir. Paylaşılan dokümanlar;

- ✓ TURQAS DKD Program Protokolü
- ✓ DKD Programları Çalışma Takvimi
- ✓ Program Prospektüsleri



Medios Medikal Bilişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Güzelevler Mah. Çınar Cad. No: 5 Yüreğir/Adana T
Tel: 0322 502 00 95
E posta: info@turqas.com
Web: www.turqas.com

