

TURQAS [®]	MEDİOS MEDİKAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ	Doküman Kodu	TUR-PRP-20
		Yürürlük Tarihi	09.10.2023
		Rev. No / Tarihi	01/15.01.2024
		Sayfa	1/2
İDRAR KİMYASI DIŞ KALİTE KONTROL PROSPEKTÜS			

İDRAR KİMYASI URİ2404 / URİ2406

KULLANIM AMACI

Klinik laboratuvarlar için ulusal ve uluslararası ölçekte dış kalite kontrol programlarının düzenlenmesi, bu programlarda kullanılacak biyolojik materyallerin oluşturulması ve bu materyallerin klinik laboratuvarlara gönderilerek test edilmesinin sağlanmasıyla geri bildirilen sonuçlar üzerinden katılımcı laboratuvarların performans değerlendirmelerinin yapılmasıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMİ VE UYARILAR

Numunelerin enfeksiyon viral etkenler yönünden serolojik testleri yapılmıştır ancak numuneler biyolojik kökenli olduğu için tüm enfeksiyon etkenleri açısından risk taşıdığı göz önünde bulundurulmalı ve bulaş riskini en aza indirecek şekilde titizlik ile çalışılmalıdır.

ÖRNEK HAZIRLIĞI

DKK numunelerine rutin numune gibi işlem yapılmalıdır. Numuneler kullanıma hazır şekilde gönderilmiştir. Test çalışması yapılacak 2 farklı o aya ait örnek numaralı 10ml kontrol materyalleri 15 dk. +18-25°C'de bekletilir. Homojen hale getirebilmek için aralıklı olarak alt üst edilmesi gerekmektedir. Alt üst etme aşamasında köpük oluşumundan kaçınılmalı materyalin iyice homojen olduğundan emin olunmalıdır. Süre sonunda tekrar alt üst yapılmalıdır.

SAKLAMA VE STABİLİTE

Numuneler soğuk zincir kuralına göre +2-8°C'de muhafaza edilmelidir. Numuneler açılmadan son kullanım tarihine kadar, açıldıktan sonra 1 ay +2-8°C'de süreyle stabildir. Saklanan örnekler tekrar çalışılmadan önce homojen hale getirildiğinden emin olunmalıdır.

SINIRLAMALAR

Sonuçların girişi TURQAS PORTAL üzerinde hataların önlenmesi ve büyük sapmaların önüne geçebilmek adına kısıtlanmıştır. Sonuçların girişi çoktan seçmeli seçenekler arasından seçim yaparak girilmektedir. Katılım için metot kısıtlaması bulunmamakla beraber numunenin çalışma aralıkları DKD protokolünde detaylı olarak sunulmuştur.

SONUÇLARIN RAPORLANMASI

Kullanıcı adınız ve şifreniz www.turqas.com adresinden TURQAS sekmesini tıklayarak "PORTAL GİRİŞİ" kısmından "Kullanıcı Adı" (sisteme tanımlı mail adresiniz) ve TURQAS tarafından belirlenen "Şifre" ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sonuçları girerken öncelikle "Laboratuvar Paneli" sekmesinden "Numune İşlemleri" alt sekmesini seçerek "Numuneyi teslim aldım." Butonunun onaylamanız gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra yine "Laboratuvar Panel" sekmesinde yer alan "Cihaz/Konum Bilgisini" ve "Test, Yöntem Tanımı" alt sekmelerini doldurduktan sonra "Sonuç Giriş" alt sekmesinden sonuçlar girilebilmektedir. Sonuçlar ölçüm belirsizlikleri bildirilmeden yapılan analiz sonucu üzerinden yapılmalıdır. Sistemde birim değiştirici bulunduğundan katılımcıların kendi birimleri ile giriş yapmalarına olanak sağlar. Giriş yapılmak istenen birim, birim listesinde yoksa TURQAS ile iletişime geçilmelidir. Sistemde sonuç girişleri kısıtlanmış olup anlamlı sayı yönlendirmesi ilgili ekranda mevcuttur. Her kurum cihaz ve yöntemini kendisi seçecektir. Cihaz/Konum Bilgisinde değişiklik yapan laboratuvarlar farklı yöntemlere geçiş yapabilirler. Sonuçlar girildikten sonra her çevrim ayından sonraki ayın 15i ile 25i arasında sonuçlar açıklanmaktadır. İlgili kurumlar raporlarını www.turqas.com adresinden kullanıcı adı ve şifre ile kendi profillerine giriş yaparak "Aylık Sonuç Raporu" sekmesinden raporlarına ulaşabilirler. Tüm raporlar TURQAS üzerinden otomatik olarak ve her kullanıcıya ayrı ayrı oluşturulur.

GEÇ GÖNDERİLEN SONUÇLAR

Kullanıcı adınız ve şifreniz www.turqas.com adresinden TURQAS sekmesini tıklayarak "PORTAL GİRİŞİ" kısmından kullanıcı adı ve TURQAS tarafından belirlenen şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sonuçları girerken "Cihaz/Konum Bilgisini" ve Test, Yöntem Tanımı sekmelerini doldurduktan sonra "Sonuç Giriş" sekmesinden sonuçlarınızı girecektir. Sonuçlar ölçüm belirsizlikleri bildirilmeden yapılan analiz sonucu üzerinden yapılmalıdır. Sistemde birim değiştirici bulunduğundan katılımcıların kendi birimleri ile giriş yapmalarına olanak sağlar. Giriş yapılmak istenen birim, birim listesinde yoksa TURQAS ile iletişime geçilmelidir. Sistemde sonuç girişleri kısıtlanmış olup anlamlı sayı yönlendirmesi ilgili ekranda mevcuttur. Her kurum cihaz ve yöntemini kendisi seçecektir. Cihaz/Konum Bilgisinde değişiklik yapan laboratuvarlar farklı yöntemlere geçiş yapabilirler. Sonuçlar girildikten sonra her çevrim ayından sonraki ayın 15i ile 25i arasında sonuçlar açıklanmaktadır. İlgili kurumlar raporlarını www.turqas.com adresinden kullanıcı adı ve şifre ile kendi profillerine giriş yaparak "Aylık Sonuç Raporu" sekmesinden raporlarına ulaşabilirler. Tüm raporlar TURQAS üzerinden otomatik olarak ve her kullanıcıya ayrı ayrı oluşturulur.

TURQAS [®]	MEDİOS MEDİKAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ	Doküman Kodu	TUR-PRP-20
		Yürürlük Tarihi	09.10.2023
		Rev. No / Tarihi	01/15.01.2024
		Sayfa	2/2
İDRAR KİMYASI DIŞ KALİTE KONTROL PROSPEKTÜS			

İDRAR KİMYASI URI2404 / URI2406

ÇALIŞMA TAKVİMİ

6 döngü, 4 döngü ve 2 kısımda belirtilmiştir. Üyelik durumunuza göre dikkate alınız.

Çalışma Ayları	Örnek Lotları	Önerilen Çalışma Takvimi	Sonuçların Tarihi	Son	Giriş
Şubat	URI2402	23.01.2024	31.01.2024		
Nisan	URI2404	20.02.2024	29.02.2024		
Haziran	URI2406	19.03.2024	31.03.2024		
Ağustos	URI2408	23.04.2024	30.04.2024		
Ekim	URI2410	21.05.2024	31.05.2024		
Aralık	URI2412	25.06.2024	07.07.2024		

Çalışma Ayları	Örnek Lotları	Önerilen Çalışma Takvimi	Sonuçların Tarihi	Son	Giriş
Şubat	URI2402	20.02.2024	29.02.2024		
Haziran	URI2406	25.06.2024	07.07.2024		
Ağustos	URI2408	20.08.2024	31.08.2024		
Aralık	URI2412	24.12.2024	31.12.2024		

NOT: Güncel dokümanları www.turqas.com web sitesi üzerinden giriş yaparak edinmeniz gerekmektedir. Paylaşılan dokümanlar;

- ✓ TURQAS DKD Program Protokolü
- ✓ DKD Programları Çalışma Takvimi
- ✓ Program Prospektüsleri



Medios Medikal Bilişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Güzelevler Mah. Çınar Cad. No: 5 Yüreğir/Adana T
Tel: 0322 502 00 95
E posta: info@turqas.com
Web: www.turqas.com

